

Boston
Scientific

VERCISE™
GENUS
Deep Brain Stimulation System

Gebruikershandleiding

Oplaadsysteem

**Inclusief
instructie video**





- Het opladen van uw Vercise™ Genus-systeem is erg gemakkelijk.

Het Vercise™ Genus-systeem voor diepe hersenstimulatie heeft een batterij met een verwachte levensduur van 25 jaar.



- Een overzicht *Oplader*

Indicatielicht

Aan-/uit-knop




+



➤ Het opladen van uw DBS-systeem is een fluitje van een cent!

- Het laadsysteem is **eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken**.
- Afhankelijk van waar de stimulator is geïmplanteerd, zult u gebruik maken van **een laadband of laadkraag**.
- De laadkraag en laadband zijn **volledig draadloos**, zodat u kunt **genieten van volledige bewegingsvrijheid** tijdens het opladen van uw apparaat.
- **U kunt zelf bepalen** waar en wanneer u uw systeem oplaad.

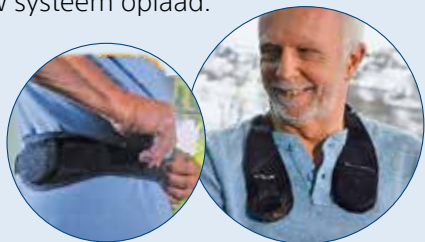

4



Alles wat u nodig heeft om uw Vercise™ Genus-stimulator op te laden:



De **oplader**



Het **oplaadstation**



Een **stopcontact**



De **laadkraag**



De **laadband**

Of



5

› Laad uw stimulator in 3 eenvoudige stappen.

1. Laad uw oplader.

- Sluit het oplaadstation aan op een stopcontact en plaats de oplader in het oplaadstation. Er brandt een **geel lampje** op de oplader. Dit betekent dat het opladen van uw oplader is gestart.



- Houd er rekening mee dat zolang het **indicatielicht geel** van kleur is, de oplader slechts **gedeeltelijk is opgeladen**. Dit betekent dat de oplader nog steeds kan worden gebruikt om uw DBS-stimulator (gedeeltelijk) op te laden.



- Wanneer het **indicatielicht groen** kleurt, is de oplader **volledig geladen**. Dit betekent dat het klaar is om uw DBS-stimulator volledig op te laden.




- Als het **indicatielicht niet brandt** terwijl de oplader op het oplaadstation ligt, kan het zijn dat deze **geen contact maakt**.



2. Plaats de oplader in uw laadkraag of laadband

- Zodra deze voldoende is opgeladen, verwijdt u de oplader van het oplaadstation. Zorg ervoor dat u de lader inschakelt – druk hiervoor op de cirkelvormige **aan-/uitknop** in het midden van de oplader – voordat u de lader in de laadkraag of laadband plaatst.
- Het **indicatielicht kleurt groen** en de oplader piept een vast continu ritme. Zodra de oplader correct is uitgelijnd met uw stimulator zal het piepen stoppen.

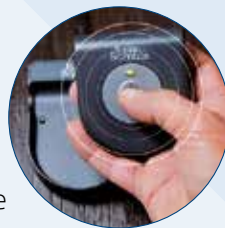

- Plaats de **oplader** in het zakje van uw laadkraag en plaats het **contragewicht** in het zakje aan de andere zijde.
- Plaats de oplaadkraag om uw nek. Zorg ervoor dat de zakken van de kraag naar buiten zijn gericht.


Of

- Plaats de **oplader** in het zakje van uw laadband en plaats deze rond de buik.



3. Plaats de laadkraag/laadband met hierin de oplader over uw stimulator.

- Beweeg de laadkraag of de laadband iets op en neer en van links naar rechts en laat het rusten over uw stimulator. Als het nodig is, kunt u de kraaglengte veranderen in de juiste maat met behulp van het **klittenband**. Bij een correcte plaatsing zal het piepsignaal stoppen.
- Controleer de oplader af en toe om er zeker van te zijn dat deze gecentreerd is **boven uw stimulator**. Indien de oplader niet goed is gecentreerd, kunnen de oplaadtijden variëren.
- U weet dat de stimulator volledig is opgeladen wanneer u **een dubbele piep hoort gedurende 60 seconden** en het **groene indicatielicht** is uitgeschakeld. Hoewel u de stimulator niet altijd tot 100% hoeft op te laden, is het prettig om te weten dat uw batterij volledig is opgeladen.

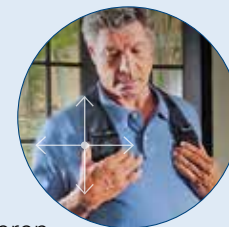

Tip: Zodra uw stimulator is opgeladen, legt u de oplader terug op het laadstation. Dit zorgt ervoor dat deze volledig wordt opgeladen voor de volgende keer dat u de oplader nodig heeft. Dan bent u helemaal klaar voor uw volgende oplaadsessie!

➤ Het opladen soepel laten verlopen

Tips & Tricks

- **Kies een laadschema dat werkt voor u:** U kunt kiezen tussen korte, frequente laadsessies of een langere, minder frequente laadsessies. Kies een routine die het beste past bij uw dagelijks leven. U kunt bijvoorbeeld gemakkelijk opladen terwijl u kijkt naar uw favoriete tv-programma of tijdens het lezen van de ochtendkrant. Een standaard laadsessie van eenmaal per week duurt over het algemeen zo'n 30-60 minuten.
- **Controleer uw batterijstatus via uw Vercise™ Genus-afstandsbediening:** Indien de oplader uw stimulator niet oplaadt, toont uw Vercise™ Genus-afstandsbediening de batterijstatus van uw stimulator. Zo kunt u gemakkelijk zien of uw stimulator moet worden opgeladen.
- **Houd uw oplaadstation aangesloten op een stopcontact,** zodat u *altijd beschikt over een opgeladen* oplader voor uw volgende oplaadsessie.



- Heeft u meer informatie nodig over hoe u uw oplaad system moet gebruiken? Bekijk de on-line stap voor stap instructie video via onderstaande QR code.



Waar kan ik heen om meer te leren?

Ga voor meer informatie naar
<http://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html>



Dit document is niet bedoeld als vervanging van de verstrekte Vercise™ en/of Vercise™ Genus Deep Brain Stimulation (DBS) Systeem Patiënt Handleiding. De inhoud van het handboek moet zorgvuldig en volledig worden gelezen en begrepen voordat u uw Vercise™ Charging System gebruikt. Mocht u vragen of verduidelijking nodig hebben van content in deze handleiding, [neem dan contact op met uw arts](#).

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd. Producten worden alleen ter informatie getoond en zijn mogelijk niet goedgekeurd of verkrijgbaar in bepaalde landen. Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.

NM-519703-AB Gedrukt in Duitsland door medicalvision.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2021 Boston Scientific Corporation
of haar dochterondernemingen.
Alle rechten voorbehouden.
DINNMO131NLB