

VERCISE™  
GENUS  
Deep Brain Stimulation System

Gebruikershandleiding

# Afstandsbediening

Inclusief  
instructie video





➤ Uw Vercise™ Genus- en Vercise™ afstandsbediening is ontworpen om het batterijniveau van uw stimulator te controleren en u te helpen uw stimulatie-instellingen te regelen om het beste aan uw individuele behoeften te voldoen.

*Ervaar zelf het gebruiksgemak!*



## ➤ Een overzicht *Afstandsbediening*



## ➤ Hoe kan ik de stimulatie in- of uitschakelen?



- Om aan de slag te gaan, houdt u de **ontgrendelknop** aan de rechterkant ingedrukt van uw afstandsbediening.



- Nu kunt u de **stimulatie inschakelen** door op de **rode knop** in het midden van uw afstandsbediening te drukken.
- Om de **stimulatie uit te schakelen**, drukt u (nogmaals) op de rode knop.

## ➤ Hoe kan ik de stimulatie verhogen of verlagen?

*Als uw arts u toestaat om uw stimulatieniveau te wijzigen, kunt u dit eenvoudig doen met uw afstandsbediening.*



- Klik eerst op de **pijl naar rechts** om het hoofdmenu te zien.
- Selecteer vervolgens 'Stimulatie'.



- U kunt dan de **plus-** of **minknoppen** gebruiken om de stimulatie op het juiste niveau aan te passen.

## ➤ Hoe kan ik stimulatieprogramma's openen of wijzigen?

*Als uw arts verschillende stimulatieprogramma's voor u heeft geprogrammeerd, kunt u deze in slechts een paar klikken openen.*



### Optie 1:

- Druk op de **programmaknop** aan de linkerkant van uw afstandsbediening.



### Optie 2:

- Klik op de **pijl naar rechts** om het hoofdmenu te zien.
- Klik een tweede keer op de **pijl naar rechts** om naar 'Programma's' te gaan.
- Klik een derde keer op de **pijl naar rechts** om naar het menu 'Programma wijzigen' te gaan.



- Van daaruit kunt u door de verschillende programma's navigeren met de **pijlen omhoog en omlaag**.
- Selecteer het gewenste programma door nog een laatste keer op de **pijl naar rechts** te klikken.

## ➤ Hoe weet ik of het stimulatieprogramma en de intensiteit geschikt zijn voor mij?

*Als uw afstandsbediening u verschillende stimulatieprogramma's biedt, is het belangrijk om met uw arts te praten over welke programma's het beste zijn voor welke symptomen. Op die manier kunt u het juiste programma kiezen.*

- Als uw arts u toestaat om de intensiteit van de stimulatie aan te passen, moet u in staat zijn om waar te nemen welk niveau geschikt is voor u op basis van de **verbetering van de symptomen**.
- Als u bijwerkingen voelt, zorg er dan voor dat u **stopt met het verhogen van de stimulatie-intensiteit**.



## ➤ Hoe kan ik mijn afstandsbediening opladen?

- Om uw afstandsbediening op te laden, sluit u de bijbehorende oplader aan op de **USB-oplaadpoort** en een **stopcontact**.



- Wanneer de batterij van de afstandsbediening **bijna leeg is**, wordt er een **herinnering** weergegeven om op te laden.



# Het gebruik van uw Vercise™ afstandsbediening.

## Tips & Tricks

- **Zorg ervoor dat uw afstandsbediening goed kan communiceren met uw stimulator.** Als uw stimulator niet reageert op de afstandsbediening, probeert u de afstandsbediening **dichter bij uw stimulator** te brengen. Denk eraan dat de stimulator niet communiceert met de afstandsbediening tijdens het opladen.
- **Maak u geen zorgen als het scherm uitschakeld na ongeveer een minuut van inactiviteit:** de afstandsbediening gaat in de **slaapstand** om de batterij te sparen.
- **Blijf op de hoogte via het startscherm van uw afstandbediening.**



Heeft u meer informatie nodig over hoe u uw oplaad system moet gebruiken? Bekijk de on-line stap voor stap instructie video via onderstaande QR code.



**Waar kan ik heen om meer te leren?**

*Ga voor meer informatie naar*  
<http://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html>



Dit document is niet bedoeld als vervanging van de verstrekte Vercise™ Gevia, Vercise™ Genus en/of Vercise™ PC Deep Brain Stimulatie (DBS) Systeem Patiëntenhandleidingen. De inhoud van de handboek moet zorgvuldig worden gelezen en volledig worden begrepen voordat u gebruik maakt van uw Vercise™ afstandsbediening. Als u vragen of verduidelijking nodig heeft over content in deze handleiding, neem dan contact op met uw arts.

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd. Producten worden alleen ter informatie getoond en zijn mogelijk niet goedgekeurd of verkrijgbaar in bepaalde landen. Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.

NM-519702-AB Gedrukt in Duitsland door medicalvision.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

© 2021 Boston Scientific Corporation  
of haar dochterondernemingen.  
Alle rechten voorbehouden.  
DINNMO130NLB